


ZITONDERSTEUNING - ONDERUITZAKKEN VOORKOMEN



Verdeel de vulling van het kussen zodat deze gelijkmatig over het gehele kussen is verdeeld. Gebruik voor volwassenen het **Comfort XL** en voor kinderen het **Comfort**

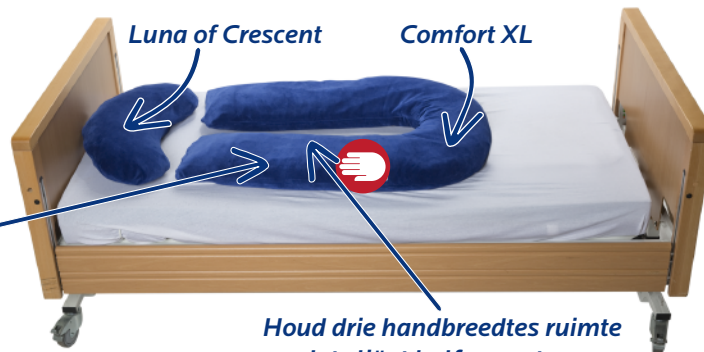

Houd drie handbreedtes ruimte zodat cliënt half op en tussen de Comfort XL komt te liggen

- Halsproblemen (Crescent)
 - Onderuitzakken in bed (Comfort XL)
 - Pijn bij het zitten aan stuit en zitbeenderen
 - Langer en beter kunnen blijven zitten
 - Hulp voor mobiliseren
 - Steun bij omvallen
 - Duizeligheid
 - Comfort

Crescent voor nekondersteuning

Comfort XL (omgekeerd)


Rugondersteuning waardoor zithouding wordt gecreëerd



Geen kans op decubitus (hielen vrij) door gebruik van REBACARE[®] verbandschoenen

Gebruik de bedbediening voor een Fowler (knie-knik)

vouwlijn

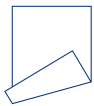

1

No force (aan de cliënt niet hardhandig duwen en trekken).

2

Neem altijd een handbreedte ruimte.

3

Alle ruimtes vullen waar het lichaam van de cliënt geen contact met het kussen heeft.

4

Tussen de cliënt en kussen strijken om overdruk van lucht weg te nemen.

5

De cliënt in een zijligging tegengesteld steunen